

# KURZ- ANLEITUNG ZUR PROBEN- GEWINNUNG

Ausführliche Gebrauchsanweisung unter [www.institut-iai.ch](http://www.institut-iai.ch) erhältlich.





## VOR DER PROBENNAHME:

- ▶ Entfernung der supragingivalen Plaque und Trockenlegung der Entnahmestelle (keine professionelle Zahnreinigung).
- ▶ Bitte beachten Sie, dass starke Blutungen und/oder Pusentleerung das Analyseergebnis verfälschen können.
- ▶ Die Verwendung antibakterieller Mundspüllösungen unmittelbar vor der Probenahme sollte vermieden werden.

## INHALT:

1 × Auftragsformular  
1 × Röhrchen  
1 × Set Papierspitzen

1 × Sicherheitsiegel  
1 × Kurzanleitung

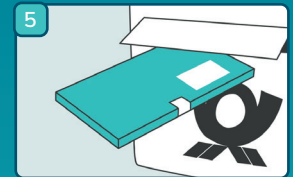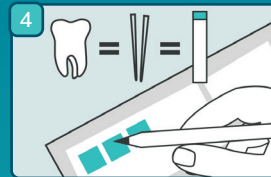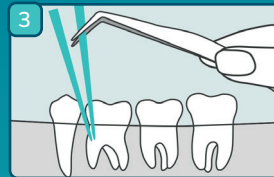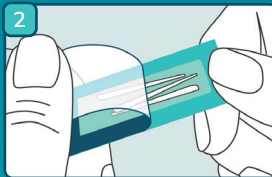

### 1. Auftrag

Füllen Sie alle Felder des Auftragsformulars gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus. Bitte Testnummer des Auftrags in Ihren Unterlagen notieren.

### 2. Vorbereitung

Nehmen Sie die Papierspitzen zur Hand und wählen Sie die Entnahmestelle für die Probe. Die Entnahme muss grundsätzlich mit **genau 2 Papierspitzen aus der tiefsten Tasche** des Parodonts erfolgen.\*

**\*Hinweis: Analyse nur bei Einsendung von genau 2 Papierspitzen möglich.**

### 3. Probenentnahme

Jeweils 2 Papierspitzen mittels steriler Pinzette in die Zahnfleischtasche bis zum Taschengrund einführen, 10-15 Sekunden dort belassen und in das mitgelieferte Röhrchen überführen.

### 4. Zusammenfassung

Probenentnahmestelle & klinische Angaben auf dem Auftragsformular notieren.

### 5. Versand

Probe und Auftragsformular im **PadoBiom®** Probenahme-Set portofrei einsenden und das Ergebnis online (nach Registrierung) sowie per Briefpost (wenn gewünscht) erhalten.