


Probengewinnung



1. Auftrag

Füllen Sie alle Formulare gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus. Testnummer des Formulars in Ihren Unterlagen notieren.

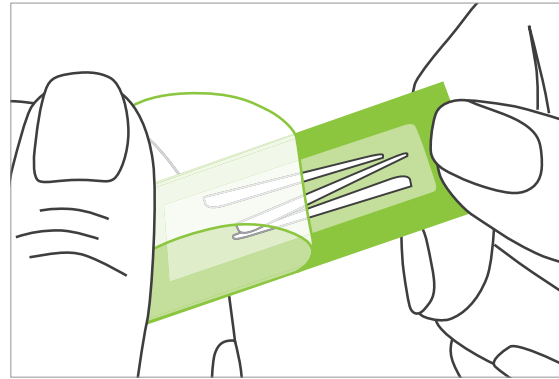

2. Vorbereitung

Nehmen Sie die Papierspitzen zur Hand und wählen Sie die Entnahmestelle(n) für die Proben.


2a. PadoTest® Multistellen-Test

Proben von mehreren Zahnfleischtaschen werden in einer Analyse zusammengefasst. Einfach alle benutzten Papierspitzen in ein Röhrchen geben.

2b. PadoTest® Einzelstellen-Test


Separate Analysen von bis zu vier verschiedenen Zahnfleischtaschen. Jede Papierspitze kommt in ein gesondertes Röhrchen.

Vor Probenentnahme: Entfernung der supragingivalen Plaque und Trockenlegung der Entnahmestelle (keine professionelle Zahnreinigung).

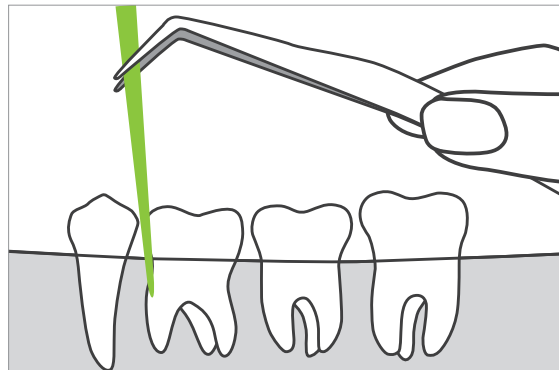


3. Probenentnahme

Papierspitze jeweils mittels steriler Pinzette in die Zahnfleischtasche bis zum Taschengrund einführen und 10–15 Sekunden dort belassen.

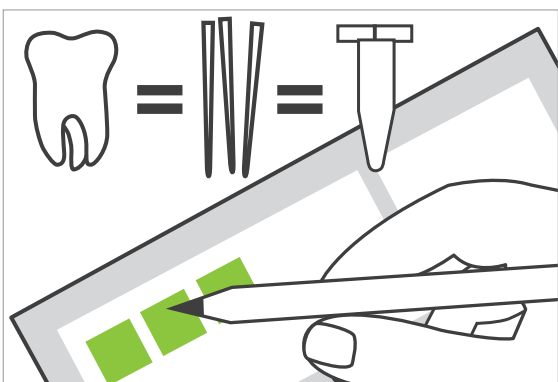

4. Zusammenfassung

Probenentnahmestelle und Taschentiefe zum jeweiligen Röhrchen auf dem Auftragsformular notieren. *Hinweis: Option „PadoSero“ auswählen (Sero-typenanalyse bei Nachweis von Aa).*

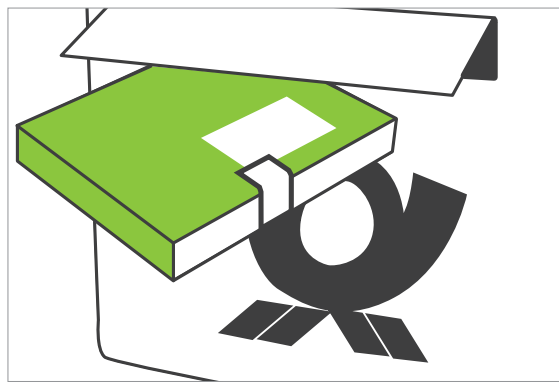

5. Versand

Proben und Dokumente in der **PadoTest®** Testkit-box portofrei einsenden und das Ergebnis online (nach Registrierung) sowie per Briefpost (wenn gewünscht) erhalten.